



SYNBIOTICS
CORPORATION

ANTIGÈNE SAW

**ANTIGÈNE CONCENTRÉ
POUR LE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE
DE LA BRUCELLOSE PAR AGGLUTINATION LENTE
(SÉRO-AGGLUTINATION DE WRIGHT)**

COMPOSITION

Suspension concentrée de *Brucella abortus* (souche 99 de Weybridge) inactivées par la chaleur et le phénol (0,5 %) et dispersées dans un tampon phéniqué à 0,5 %.

INDICATION

Diagnostic sérologique de la brucellose bovine par agglutination lente.

MODE D'UTILISATION

Agiter avant l'emploi

Diluer extemporanément au 1/10^e en soluté physiologique phéniqué à 0,5 %.

CONSERVATION

Conserver entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

PRÉSENTATION

Flacon de 100 ml

CODE ASAW

ANTIGÈNE SAW

400 réactions

NOTICE RÉVISÉE : juillet 2006

USAGE IN VITRO

SYNBIOTICS EUROPE - 2 rue Alexander Fleming 69367 LYON Cedex 07 - FRANCE